


ZZZ Silent

Uso Clínico do Calibrador

O calibrador de avanço mandibular foi projetado para registrar diretamente o avanço mandibular adequado (protrusão) para o paciente receber o ALIRAN SLIENT. A estrutura maleável do garfo se adapta à curvatura do plano oclusal e destina-se a proporcionar uma remoção fácil do material de registro (PVS - Silicona de Adição). Dobrar o medidor não deve afetar a precisão do registro, o que ajuda a garantir um resultado clinicamente preciso. Se por qualquer motivo o registro adequado não for possível, o ALIRAN SILENT também podem ser fabricado com os modelos em oclusão.

Instruções

Limpe o calibrador Alikan Silent. Como regra geral, consideramos suficiente a metade do avanço máximo da mandíbula (em milímetros), para início do tratamento com o Alikan Silent. Caso essa posição de avanço da mandíbula seja previamente determinada, pule os passos 2 e 3 e continue com o passo 4 para marcar a posição de avanço desejada e faça o registro

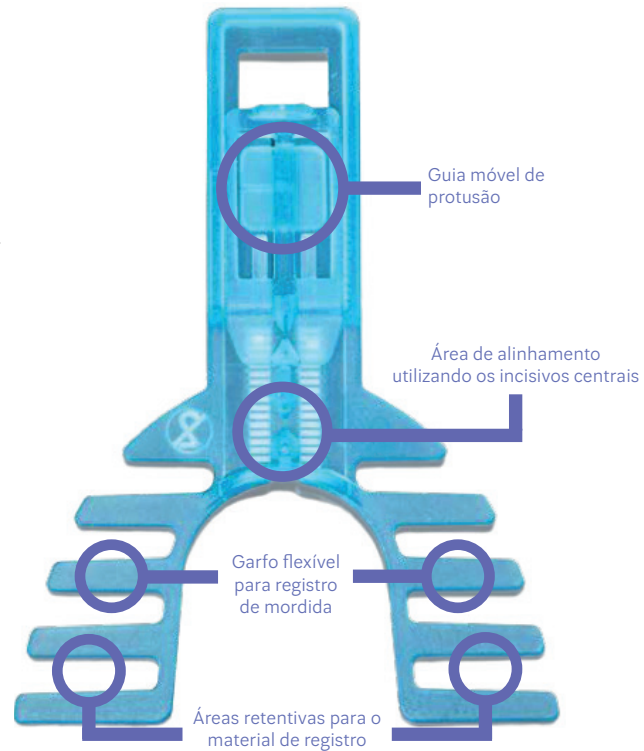

Passo 1

Insira o calibrador, usando os centrais superiores para garantir o alinhamento correto.



Passo 2

Marque a posição da mandíbula do paciente quando em alinhamento da mordida natural.



Passo 3

Peça ao paciente para estender a mandíbula o mais à frente possível, e marque o avanço máximo.



Passo 4

Marque a protrusão final (normalmente metade da protrusão máxima) desejada. Retrair a mandíbula para deslizar o calibrador para esta posição final.



Passo 5

Use Silicona de adição para registrar o alinhamento e mordida na protrusão final desejada.



Passo 6

A tomada do registro de mordida com o calibrador será usado para alinhar dispositivo customizado ALIRAN SILENT do paciente.